





Lathund CoPilot

Vårdarstyrning till rullstol med
R-net elektronik

Permobil AB
Box 120
861 23 Timrå

www.permobil.se

Lathund CoPilot Rnet

1. Justera vinkeln på vårdarhandtaget så att det är i linje med underarmen (Se gul linje).
Justera till önskad höjd (2.) och vinkla (3. och 4.)
Se illustrationen på baksidan.
2. **Håll inte i handtaget när du slår på stol!** 
Slå på stol med knapp märkt.
Stolen behöver ca. 2 sekunder på sig för att nollställa styrningen.
3. Om stolen är utrustad med både vårdarstyrning och brukarstyrning kan man välja vem som ska köra genom att trycka på knappen som är märkt med. 
4. Bägge lamporna på vårdarstyrningen lyser när den är klar att använda.
När brukarstyrningen används syns symbol uppe i vänster hörn på panel.
Om stolen startas med knappen på vårdarstyrningen är det bara den styrningen som kan användas.

Viktigt:

Läs CoPilot bruksanvisning före rullstolen används första gången.

