




Lathund CoPilot+ (version 2)
Vårdarstyrning till rullstol
med Pilot + elektronik

Permobil AB
Box 120
861 23 Timrå

www.permobil.se

Lathund CoPilot + v.2

1. Justera vinkeln på vårdarstyrningshandtaget så att det är i linje med underarm. (2 och 3)
Justera till önskad höjd (1). Se illustration
2. **Håll inte i handtaget!**
Slå på stol med knappen 
Stolen behöver ca. 2 sekunder för att nollställa styrningen.
3. Hastigheten på stolen är förhandsprogrammerad och ska inte justeras.
Stolshastigheten följer din gånghastighet.
Lampa näst längst ner i skalan ska lysa. 
4. Stolen har säkring mot användning av för stora krafter på vårdarstyrningen.
Vid överbelastning stannar stolen och batteriskalan blinkar. Slå av och på stol igen.

Viktigt:

Läs CoPilot bruksanvisning innan rullstolen används första gång.

